



[www.nausicaa-medical.com](http://www.nausicaa-medical.com)

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes permettant de transférer une personne en position debout.  
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

## SANGLE DE VERTICALISATEUR VERTICONFORT



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
La sangle se positionne au niveau de la taille sur le WAYUP et le réglage se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

La sangle se positionne au niveau de la taille et/ou en sous-axillaire sur l'EASYLEV en fonction du tonus du patient.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



SVERTICONF-PF

v 02.10/23

## Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



# SANGLE DE VERTICALISATEUR VERTICONFORT

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

<b>S</b>	A	<b>81</b>	<b>L</b>	A	<b>107</b>
	B			B	
<b>M</b>	A	<b>94</b>	<b>XL</b>	A	<b>123</b>
	B			B	

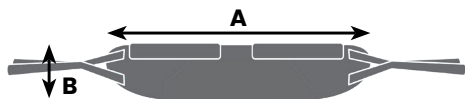

### Composition

Jersey 100 % polyester

Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN

Mousse PE 50 kg/m<sup>3</sup>

Mousse PE 100 kg/m<sup>3</sup>

Mousse polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>

Mousse polyuréthane 18 kg/m<sup>3</sup>

Enduction polyuréthane sur polyester

Biais polyester 40 mm

Biais polyester 20 mm

Auto-agrippant 100 % polyester

Positionner le bas du dossier au niveau de la taille afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne.

Accrocher les deux attaches du dossier aux crochets du verticalisateur.

## RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet d'ajuster la position de la personne.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du verticalisateur, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le verticalisateur, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.