

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

ATTACHES



ATTACHE DE POIGNETS

USAGE : MAINTIEN LÉGER DES POIGNETS POUR PATIENT PEU AGITÉ



ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ

USAGE : MAINTIEN FORT DES POIGNETS POUR PATIENT AGITÉ



ATTACHE DE CHEVILLES

USAGE : MAINTIEN DES CHEVILLES SUR LE MATELAS ÉVITANT QU'ELLES NE S'ENTRECHOQUENT



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ



LMATPO2-PF / LMATPOS2-PF / LMATCH2-PF

v 03.03/2020

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

ATTACHES

Composition :

ATTACHE DE POIGNETS

Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-agrippant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

Composition :

ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ

Jersey coton polyester doublé de
mousse polyuréthane
Auto-agrippant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

Composition :

ATTACHE DE CHEVILLES

Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-agrippant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

ATTACHE DE POIGNETS

USAGE : MAINTIEN LÉGER DES POIGNETS POUR PATIENT PEU AGITÉ

Mettre le poignet, côté fourrure, dans le bracelet.

A l'aide de l'auto-agrippant, fermer le bracelet.

Passer la sangle autour de l'objet servant de fixation à l'attache-poignet.

Régler la longueur de la sangle avec la boucle nylon.

ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ

USAGE : MAINTIEN FORT DES POIGNETS POUR PATIENT AGITÉ

- Passer la sangle se trouvant à l'extrémité pointue du bracelet, dans la fente (1).
- Faire passer le poignet de la personne à travers cette boucle (2).
- Ajuster à la taille du poignet à immobiliser, et fermer le bracelet à l'aide de l'auto-agrippant. Puis passer cette sangle dans la boucle (2).
- Nouer les sangles autour de l'objet servant de fixation à l'attache-poignet.



ATTACHE DE CHEVILLES

USAGE : MAINTIEN DES CHEVILLES SUR LE MATELAS ÉVITANT QU'ELLES NE S'ENTRECHOQUENT

Mettre chaque cheville, côté fourrure, dans chaque bracelet.

A l'aide de l'auto-agrippant, fermer chaque bracelet.

Passer la sangle autour de l'objet servant de fixation à l'attache-cheville.

Régler la longueur de la sangle avec la boucle nylon.

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ