



Sangle de toilette Premium jersey

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

- Disponible uniquement en jersey
- Tailles S, M, L, XL.

La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.
Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Cette sangle se positionne avec les bras à l'extérieur.

Réglage des accroches



Le système d'accroche sur fléau 2 points ou 4 points permet de faire varier la position du patient.
Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position assise avec un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

Positionnement des sangles



Choix conseillé



Choix conseillé



Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	STO-PF (jersey)
OPTION	TABAL-PF (têteère amovible et baleinée)