



Sangle de verticalisateur Premium

La sangle se positionne en bas du dos (au niveau des lombaires) en position assise. La sangle doit être en tension et accrochée au 1er ou 2ème cran (vert ou jaune) sur le bras du wayup. Elle possède une **ceinture abdominale afin de sécuriser davantage le patient**. Cette sangle peut être utilisée pour une aide à la déambulation. **Une sangle sous fessière permet également d'effectuer un transfert assis (sangles incluses)**. Il est impératif de choisir la bonne taille correspondant au gabarit du patient (cf guide des tailles p 27).

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.

Réglage des accroches



Position classique : Vert ou Jaune (1er ou 2ème cran), si le patient présente un tonus relatif au niveau du (buste ou tronc).
Position croisée : Rouge ou Noir (3ème ou 4ème cran), si le patient présente un manque de tonus au niveau du (buste ou tronc) et des membres inférieurs. Possibilité de travailler de façon asymétrique notamment pour des cas spécifiques (exemple : hémiplegie) : Utiliser un cran plus court du côté faible (ex : vert du côté faible et jaune du côté fort) pour compenser la faiblesse du tonus (uniquement vertic).

Positionnement des sangles



CROISE

Manque de tonicité du buste



**Avec sangle sous-fessière



*Aide à la déambulation

Option

Sangle sous-fessière **confort** (réf.: SFC)



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SWYP3-PF
OPTION	SFC