

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CEINTURE ABDOMINALE LARGE

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDICUÉ :

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
**PRÉVENIR LES CHUTES
ET SUPPLÉER AU
RELÂCHEMENT DES
ABDOMINAUX**



Périmètre maximum utile : + 230 cm
Hauteur de la ceinture : + 18 cm
Boucle : 50 mm

Sa large surface de contact évite toute constriction abdominale.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :



CCA2HP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE ABDOMINALE LARGE

Composition

Jersey polyester enduit
de polyuréthane doublé
de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué : PRÉVENIR LES CHUTES ET SUPPLÉER AU RELÂCHEMENT DES ABDOMINAUX

- Mettre la ceinture autour de la taille de la personne, la face lisse vers l'extérieur.
- Faire passer l'extrémité pointue au travers de la fente.
- Passer les sangles autour du dossier du fauteuil ou du matelas.
- Ajuster la longueur des sangles à l'aide des boucles de fermeture.

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ