

www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE BIRDY

POUR TOUS FAUTEUILS - SPÉCIAL COQUILLE



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDiqué :
**EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT**



Périmètre maximum utile : + 220 cm
Boucle : 50 mm

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
Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.
Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
Tour de taille (en cm)



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.



CBR2HP-PF



v 07.02/25

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



CEINTURE BIRDY

Composition

Jersey polyester enduit
de polyuréthane doublé
de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :
EMPÊCHER LE GLISSEMENT DU BASSIN VERS L'AVANT

1. Glisser la ceinture Birdy dans le dos du patient au niveau des lombaires et ajuster les passants sur chaque hanche.
2. Passer l'extrémité de la ceinture sous la cuisse légèrement soulevée.
3. Répliquer l'opération sur la deuxième cuisse.
4. Passer chaque boucle dans le passant afférent.
5. Fermer la boucle au dos du fauteuil.

