

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CEINTURE BIRDY INTÉGRALE

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



**À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT
ET MAINTENIR LE BUSTE
DROIT**




Périmètre maximum utile : + 220 cm
Boucle : 50 mm

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

• Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL

Tour de taille (en cm)

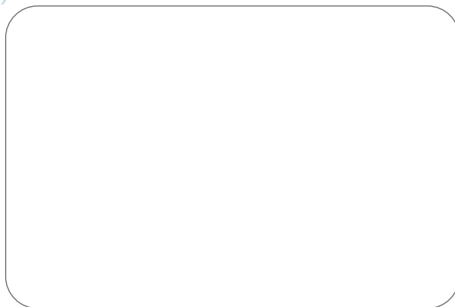

CBRIN2HP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE BIRDY INTÉGRALE

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane

Biais 100 % polyester

Sangles 100 % polyester

Boucles nylon

Épaulières à mousse thermocompressée

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

**EMPÊCHER LE GLISSEMENT DU BASSIN VERS L'AVANT
ET MAINTENIR LE BUSTE DROIT**

1. Passer la tête du patient dans le baudrier à bretelles.
2. Glisser la ceinture Birdy dans le dos du patient au niveau des lombaires et ajuster les passants sur chaque hanche.
3. Passer l'extrémité de la ceinture sous la cuisse légèrement soulevée.
4. Répliquer l'opération sur la deuxième cuisse.
5. Passer chaque boucle dans le passant afférent.
6. Ajuster la ceinture abdominale avec son auto-agrippant.
7. Insérer la boucle double dans la sangle de dos.
8. Fermer la boucle au dos du fauteuil.
9. Ajuster au dos les deux boucles arrière du baudrier.



v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**