

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CEINTURE BIRDY

POUR TOUS FAUTEUILS - SPÉCIAL COQUILLE



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ



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
À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
**EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT**



Périmètre maximum utile : + 220 cm
Boucle : 50 mm

Elle peut être mise en place avec le patient assis et évite toute constriction pelvienne.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Tour de taille (en cm)



CBR2HP-PF

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE BIRDY

Composition
Jersey polyester enduit
de polyuréthane doublé
de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION à n'utiliser que pour l'usage indiqué : EMPÊCHER LE GLISSEMENT DU BASSIN VERS L'AVANT

1. Glisser la ceinture Birdy dans le dos du patient au niveau des lombaires et ajuster les passants sur chaque hanche.
2. Passer l'extrémité de la ceinture sous la cuisse légèrement soulevée.
3. Répliquer l'opération sur la deuxième cuisse.
4. Passer chaque boucle dans le passant afférent.
5. Fermer la boucle au dos du fauteuil.

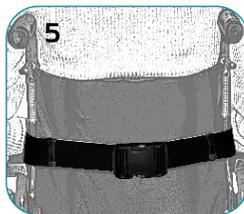

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ