

**Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

SPÉCIAL POUR LITS

Conforme à la préconisation de l'ANSM concernant la sensibilisation sur le risque d'étouffement lors de la sécurisation d'un patient à l'aide d'un dispositif de maintien au lit.



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
**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :

**PRÉVENIR LES  
CHUTES, SUPPLÉER  
AU RELACHEMENT  
DES ABDOMINAUX ET  
POSITIONNER AU LIT**

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit. Elle procure au patient un positionnement sécurisé..  
Compatible avec le système NAUSI-SURE (fermeture magnétique).



CMLP2HP-PF

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.

# CEINTURE DE MAINTIEN AU LIT

Conforme à la préconisation de l'ANSM concernant la sensibilisation sur le risque d'étouffement lors de la sécurisation d'un patient à l'aide d'un dispositif de maintien au lit.

**Composition**  
Jersey polyester enduit  
de polyuréthane doublé  
de mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon

## NOTICE D'UTILISATION à n'utiliser que pour l'usage indiqué : PRÉVENIR LES CHUTES, SUPPLÉER AU RELACHEMENT DES ABDOMINAUX ET POSITIONNER AU LIT

- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le dessus (photo 1).
- Passer la sangle de l'extrémité étroite dans la fente de la ceinture.



Photo 1



Photo 2



Photo 3

- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du sommier (usage lit-photo 2) ou derrière le dossier du fauteuil.

- Connecter les 2 sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du patient avec la boucle clic-clac et régler la tension (usage lit).  
Cette sangle peut être sécurisée avec le dispositif NAUSI-SURE (photo 3).

- Passer la première jambièrre sous la cuisse du même côté et passer la sangle dans le passant du même côté.

- Répliquer l'opération pour l'autre jambe.

- Passer chaque sangle de jambièrre autour du montant fixe du sommier et les connecter avec la boucle clic-clac en les passant par dessus le patient (usage lit-photo 4-5) ou derrière le dossier (usage fauteuil).  
Régler la tension.



Photo 4



Photo 5

### USAGE LIT Important :

- Veillez à ce que le positionnement du dispositif n'entrave pas l'usage du relève buste (risque de compression).
- Bien positionner le dispositif au niveau de la partie fixe du sommier articulé.
- Refermer les barrières et mettre le lit en position basse.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**