

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE ÉCO EVOLUTIVE

POUR TOUS FAUTEUILS



CEICOA



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
CEICOA+CEICO-MP

Une ceinture abdominale, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

- Périmètre maximum utile : 228 cm



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



CEICO3-PF-A



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.



v 07.02/25

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



CEINTURE ÉCO EVOLUTIVE

Composition
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Jersey 100 % polyester
Biais 100 % coton
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

La ceinture eco se décline sous 2 variantes modulables :

1 - La ceinture eco abdominale (CECO-CA)

- a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

2 - La ceinture eco pelvienne (CECO-P) se compose de la ceinture eco abdominale à laquelle vient s'ajouter un module de maintien pelvien.

- a - Positionner le maintien pelvien sur l'assise du fauteuil, et fixer la sangle 25 mm au dossier du fauteuil avec le minimum de jeu.
- b - Asseoir le patient sur le fauteuil et sur la sangle.
- c - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- d - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur de la sangle, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- e - Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.



Compatible avec le système NAUSI-SURE
à clé magnétique.
Nous consulter pour plus d'information.