

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CEINTURE ÉCO MODULABLE

POUR TOUS FAUTEUILS

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


**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



Une ceinture abdominale, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien pelvien en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

- Périmètre maximum utile : 228 cm



CECO2-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE ÉCO MODULABLE

Composition
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Jersey 100 % polyester
Biais 100 % coton
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

La Ceinture ECO se décline sous 2 variantes modulables :

1 - la Ceinture ECO Abdominale (CECO-CA)

a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.

b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.

c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

2 - la Ceinture ECO Pelvienne (CECO-P) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien Pelvien.

a - Positionner le maintien pelvien sur l'assise du fauteuil, et fixer la sangle 25 mm au dossier du fauteuil avec le minimum de jeu.

b - Asseoir le patient sur le fauteuil et sur la sangle.

c - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.

d - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur de la sangle, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

e - Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.



Compatible avec le système NAUSI-SURE
à clé magnétique.
Nous consulter pour plus d'information.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**