

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CEINTURE ÉCO

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



À N'UTILISER QUE POUR
L'USAGE INDICUÉ :


PRÉVENIR LES CHUTES



Périmètre maximum utile : + 164 cm
Hauteur de la ceinture : + 11 cm
Boucle : 50 mm

Simple et en taille unique, elle est conçue pour différentes utilisations au fauteuil.

- Périmètre maximum utile : 164 cm
- Sans contrainte de tailles

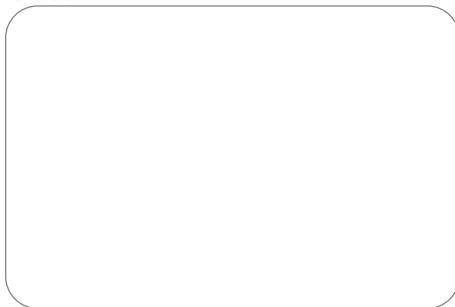

CCMED2HP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE ÉCO

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué : PRÉVENIR LES CHUTES

- Positionner la ceinture au niveau de l'abdomen du patient (au niveau des hanches) et refermer la boucle au dos du fauteuil.
- f - Passer la sangle du maintien pelvien dans le passant de la partie pelvienne. Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ