

**Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



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
**À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :  
EMPÊCHER LE GLISSEMENT  
DU BASSIN VERS L'AVANT  
ET MAINTENIR LE BUSTE  
DROIT**



Périmètre maximum utile : + 230 cm  
Hauteur de la ceinture et largeur  
partie pelvienne : + 11 cm  
Largeur sangle : + 48 mm  
Boucle : 50 mm

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
  - Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation)
- Tour de taille (en cm)



CSYP2HP-PF

### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

## CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE

Composition  
Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé  
de mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon  
Epaulières : mousse thermocompressée

### NOTICE D'UTILISATION

**à n'utiliser que pour l'usage indiqué :**

**Empêcher le Glissement du Bassin Vers l'Avant et Maintenir le Buste Droit**

- Positionner la partie pelvienne sur l'assise du fauteuil et faire sortir la boucle vers l'arrière du fauteuil.
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- Fermer la ceinture en utilisant la fermeture auto-agrippante.
- Mettre en place le baudrier, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne.
- Passer la sangle de la partie ceinture derrière le dossier du fauteuil.
- Avant de la refermer, sans l'ajuster, vérifier que l'attache de dossier à une boucle femelle vers le bas et deux boucles femelles vers le haut.
- Fermer les 4 boucles arrières et les ajuster à la morphologie du patient et à son support.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**