

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

CEINTURE SLIM Y

POUR TOUS FAUTEUILS



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDICUÉ :


**PRÉVENIR LA CYPHOSE
CERVICALE EN
MAINTENANT LE BUSTE
DROIT**



Périmètre maximum utile : + 230 cm
Hauteur de la ceinture : + 11 cm
Largeur sangle : + 48 mm
Boucle : 50 mm

Les hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :

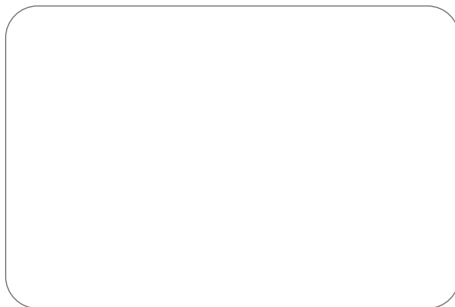

CSY2HP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE SLIM Y

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon
Épaulières à mousse thermocompressée

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué : PRÉVENIR LA CYPHOSE CERVICALE EN MAINTENANT LE BUSTE DROIT

- Mettre en place le boudrier, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil.
- Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne. Fermer la ceinture en utilisant la fermeture auto-agrippante.
- Ceinturer le patient et le dossier du fauteuil avec la sangle abdominale.
- Fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- Fermer les boucles des bretelles et ajuster leurs longueurs (voir recto).

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ