

**Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## CEINTURE YZA

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
POUR TOUS FAUTEUILS



Une ceinture abdominale taille unique, plus deux modules (un pelvien et un de buste), vous permettent quatre configurations (maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral).

Vous pouvez ainsi passer aisément de l'une à l'autre et vous adapter à tous les patients sans contrainte de tailles.

• Périmètre maximum utile : 200 cm



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



YZA2CAHP-PF

v 03.03/2020

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

# CEINTURE YZA

Composition  
Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé  
de mousse polyuréthane  
Biais 91 % polyamide - 9 % élasthanne  
Sangle 100 % polyester  
Épaulière en PVC  
Boucle nylon

## NOTICE D'UTILISATION

**Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.**

La Ceinture YZA se décline sous 4 variantes modulables :

### 1 - la Ceinture YZA Abdominale (YZA-CA)

- a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

### 2 - la Ceinture YZA Pelvienne (YZA-CP) se compose de la Ceinture YZA Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien Pelvien.

- a - Positionner le maintien pelvien sur l'assise du fauteuil, et fixer la sangle 25 mm au dossier du fauteuil avec le minimum de jeu.
- b - Asseoir le patient sur le fauteuil et sur la sangle.
- c - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- d - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur de la sangle, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- e - Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.

### 3 - la Ceinture YZA de Buste (YZA-CB) se compose de la Ceinture YZA Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste.

- a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- d - Mettre en place le baudrier, fermer la boucle de 50 mm, positionner les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil. Passer une sangle d'épaule sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.

### 4 - la Ceinture YZA Intégrale (YZA-CI) se compose de la Ceinture YZA Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste et un Module de Maintien Pelvien.

- a - Pour la mise en place de la ceinture YZA Intégrale, procéder d'abord comme pour la ceinture YZA Pelvienne (2) puis comme le paragraphe d et e de la ceinture YZA de Buste (3).



Compatible avec le système NAUSI-SURE  
à clé magnétique.  
Nous consulter pour plus d'information.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**