

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

ÉCHARPES DE BRAS

SOUTIEN D'UN BRAS OU D'UN AVANT BRAS FRACTURÉ



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



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
Écharpe de bras

Soutien d'un bras plâtré, maintien du bras selon un angle réglable avec repose-pouce, réversible droite et gauche.

Elles sont confortables et équipées d'un repose-pouce. L'addition d'une sangle dorsale permet de maintenir l'écharpe contre le corps de l'utilisateur (ECBSM).

Écharpe de bras avec sangle dorsale

Immobilisation complète du bras avec repose-pouce, réversible droite et gauche.



ECB-PF / ECBSM-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

ÉCHARPE DE BRAS

Composition
Filet 100 % polyester
Biais 100 % coton
Sangles coton, matelassage polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION à n'utiliser que pour l'usage indiqué : SOUTIEN D'UN BRAS OU D'UN AVANT BRAS FRACTURÉ

• Après avoir placé le bras dans l'écharpe, passer la sangle 1 autour du cou et l'ajuster en fonction de la position souhaitée du bras.

• Pour le modèle avec sangle dorsale permettant une immobilisation «coude au corps», passer la sangle 2 autour de la taille et la fixer avec la boucle rapide.



v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ