

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :  
coutures, des sangles, du tissu.*

*Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

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
## SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE (AVEC TÊTIÈRE)



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR  
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Confort à Réglage Rapide (avec tête) est conseillée pour les transferts lit/fauteuil/lit nécessitant une prise en charge du maintien de tête.
- La tête intégrée et baleinée protège les cervicales pour les patients sans maintien de tête ou lors d'un ramassage au sol.
- Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux à 2 points) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.



SML-PF

### Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

# SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE (AVEC TÊTIÈRE)

## TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C
S	59	88	75
M	66	92	83
L	71	96	92
XL	77	101	102

Composition  
TISSU 100% POLYESTER  
MOUSSE PE 150 kg/m<sup>3</sup>  
SANGLES 100% POLYESTER

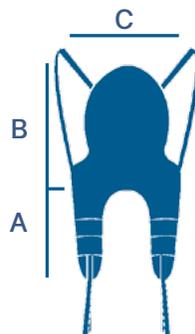

### NOTICE D'UTILISATION

**Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.**

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-malade en quatre points :

- 2 de part et d'autre du dossier,
- 1 à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Les deux systèmes d'attache des supports de cuisse se trouvent entre les jambes de la personne. Passer ces deux systèmes l'un à travers l'autre. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personnes.

### RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par oreilles multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en œuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Les suspentes de support de cuisse doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personne mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-personne mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

v 02.03/2019



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**