

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE




Compatible avec la
tête amovible
(TAMOV).



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Confort à Réglage Rapide est conseillée pour les transferts lit/fauteuil/lit nécessitant une prise en charge du maintien de tête.
- Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux à 2 points) permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

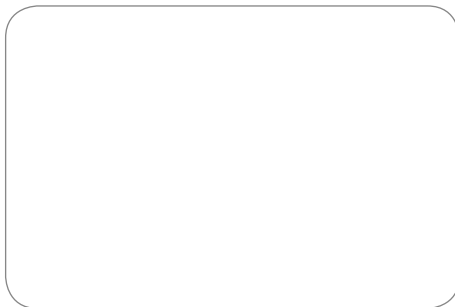

SSTBA-PF

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

SANGLE CONFORT À RÉGLAGE RAPIDE

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C
S	59	88	75
M	66	92	83
L	71	96	92
XL	77	101	102

Composition Jersey
Jersey 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m³
Baleinage aluminium
Biais polyester 40 mm

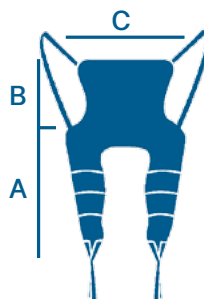

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Les suspentes de support de cuisse doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ