

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :  
coutures, des sangles, du tissu.*

*Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

## HAMAC CONFORT FILET SANS CROISEMENT




Compatible avec  
la tête amovible  
(TAMOV).



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR  
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la sangle Hamac Bain Sans Croisement est conseillée pour les transferts en baignoire, douche et piscine pour les patients amputés.
- C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
- Cette sangle évite la constriction des hanches.

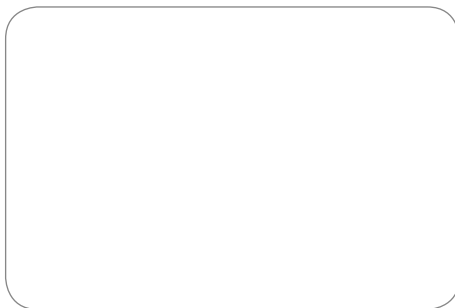

SUCBAHA-PF


### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

## HAMAC CONFORT FILET SANS CROISEMENT

### TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C
S	41	53	75
M	46	57	83
L	50	61	92
XL	55	66	102

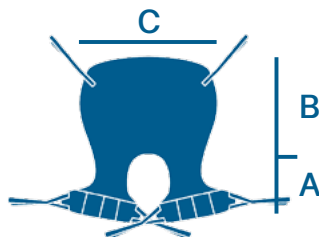

Composition  
Jersey 100 % polyester  
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN  
Mousse PE 50 kg/m<sup>3</sup>  
Biais polyester 40 mm

### NOTICE D'UTILISATION

**Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.**

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle.  
Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-malade en six points :

- 2 de part et d'autre du dossier,
- 2 à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les suspentes du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite, les attaches de chaque côtés de la cuisse. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Accrocher les deux attaches du dossier au fléau du lève-personnes mobile. Passer les deux attaches d'une même cuisse au même crochet du fléau .

### RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.  
Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.  
Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.  
Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

v 02.03/2019



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**