

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :  
coutures, des sangles, du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

## SANGLE CONFORT DE TRANSFERT RAPIDE




Compatible avec la  
tête amovible et  
baleinée (TABAL).



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR  
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle de Transfert Rapide est conseillée pour les transferts aux toilettes et les changes.
- Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.
- Le passage des jambes se fait de l'intérieur vers l'extérieur d'où sa forme échancrée.
- Cette sangle évite la constriction des hanches.
- Cette sangle est déconseillée aux patients à très faible tonicité.

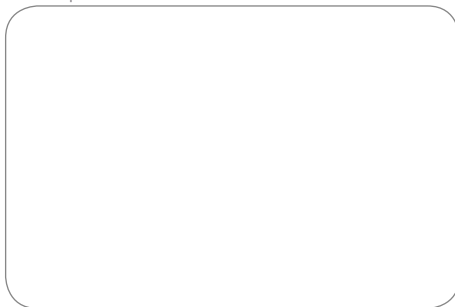

SATL-PF

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.


# SANGLE CONFORT DE TRANSFERT RAPIDE

## TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	Tour de poitrine	A	B	C
S	70/90	71	23	81
M	90/115	86	23	95
L	115/140	98	23	109
XL	140/165	108	23	123

### Composition

Jersey 100 % polyester  
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN  
Mousse PE 50 kg/m<sup>3</sup>  
Mousse polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>  
Biais polyester 40 mm  
Auto agrippant 100% Polyester

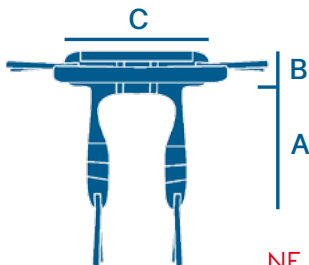

**NE PAS UTILISER  
AVEC UN PATIENT  
HYPOTONIQUE**

## NOTICE D'UTILISATION

**Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.**

Le dossier de ce type de sangle, est constitué par la partie large de la sangle. Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U. Ce type de sangle dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personnes en quatre points: 1, à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau des omoplates afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne, afin que les bourrelets soient sous les aisselles. Fermer le plastron.

En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer de l'extérieur de la cuisse vers l'intérieur l'attache du support de cuisse droit, procéder de même pour le support de cuisse gauche. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse, au fléau du lève-personnes.

2, de part et d'autre du dossier

## RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par oreilles multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du lève-personne mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le lève-personne mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

v 02.03/2019



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**