

*Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient.
Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du
dispositif : coutures, état des boucles, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par Nausicaa Médical, soit une mise au rebut.*

CEINTURE DE BUSTE ÉCO MODULABLE


POUR TOUS FAUTEUILS



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ



Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

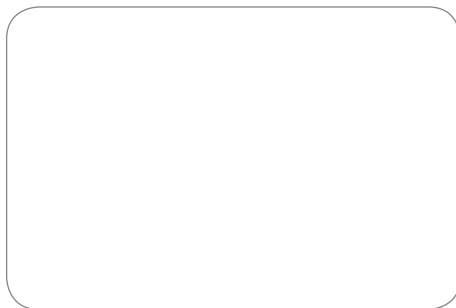

CECO2-PF-B

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE DE BUSTE ÉCO MODULABLE

Composition
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Jersey 100 % polyester
Biais 100 % coton
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

La Ceinture de Buste ECO Modulable se décline sous 2 variantes modulables :

1 -la Ceinture ECO de Buste (CECO-B) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste.

a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.

b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.

c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.

d - Mettre en place le baudrier, fermer la boucle de 50 mm, positionner les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil. Passer une sangle d'épaule sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.

2 -la Ceinture ECO Intégrale (CECO-I) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste et un Module de Maintien Pelvien.

a - Pour la mise en place de la ceinture ECO Intégrale, procéder d'abord comme pour la ceinture ECO Pelvienne (2) puis comme le paragraphe d et e de la ceinture ECO de Buste (3).



Compatible avec le système NAUSI-SURE
à clé magnétique.
Nous consulter pour plus d'information.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ