

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*


SANGLE ÉCO



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION
PAR UN PROFESSIONNEL DE
SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Éco est disponible en taille unique et s'utilise avec tous les verticalisateurs.
- Elle se positionne sous les aisselles ou sur les lombaires en fonction de l'appareil utilisé.
- Son rembourrage évite les pressions douloureuses.

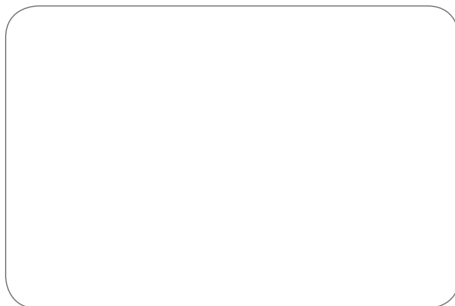

SXPECO-PF


Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

SANGLE ÉCO

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

| | A | B |
|---------------|----|-----|
| Taille unique | 29 | 106 |

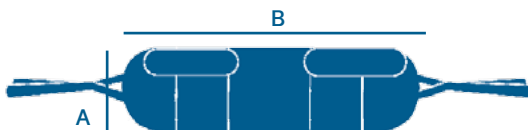

Composition

Jersey 100% polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m³
Mousse polyuréthane 18 kg/m³
Biais polyester 20 mm

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

Positionner le bas du dossier au niveau des lombaires afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne.

Accrocher les deux attaches du dossier aux crochets du releveur mobile.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet d'ajuster la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles. Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du releveur mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le releveur mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ