

*Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient.
Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du
dispositif : coutures, état des boucles, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par Nausicaa Médical, soit une mise au rebut.*

CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE

POUR TOUS FAUTEUILS



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ




À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
**EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT
ET MAINTENIR LE BUSTE
DROIT**



Périmètre maximum utile : + 230 cm
Hauteur de la ceinture et largeur
partie pelvienne : + 11 cm
Largeur sangle : + 48 mm
Boucle : 50 mm

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation).
- Tour de taille (en cm)

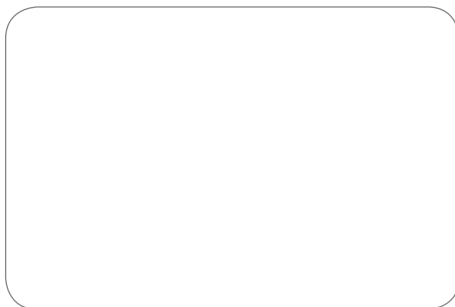

CSY2HP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

CEINTURE SLIM Y & PELVIENNE

GAMME HOSPITALIERE

Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane

Biais 100 % polyester

Sangles 100 % polyester

Boucles nylon

Epaulières : mousse thermocompressée

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

EMPÊCHER LE GLISSEMENT DU BASSIN VERS L'AVANT ET MAINTENIR LE BUSTE DROIT

- Positionner la partie pelvienne sur l'assise du fauteuil et faire sortir la boucle vers l'arrière du fauteuil.
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- Fermer la ceinture en utilisant la fermeture auto-agrippante.
- Mettre en place le boudier, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne.
- Passer la sangle de la partie ceinture derrière le dossier du fauteuil.
- Avant de la refermer, sans l'ajuster, vérifier que l'attache de dossier à une boucle femelle vers le bas et deux boucles femelles vers le haut.
- Fermer les 4 boucles arrières et les ajuster à la morphologie du patient et à son support.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ