

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :  
coutures, des sangles, du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

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
## SANGLE SOUS-AXILLAIRE



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION  
PAR UN PROFESSIONNEL DE  
SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Sous-Axillaire est disponible en 4 tailles et s'utilise avec tous les verticalisateurs.
- Elle s'utilise positionnée sous les aisselles.
- Son rembourrage en mousse souple épouse la forme du corps répartissant ainsi les pressions.



SAPVR-PF


### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

## SANGLE SOUS-AXILLAIRE

### TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	Tour de poitrine	A	B
S	70 / 90	21	78
M	90 / 115	25	92
L	115 / 140	29	106
XL	140 / 165	33	120

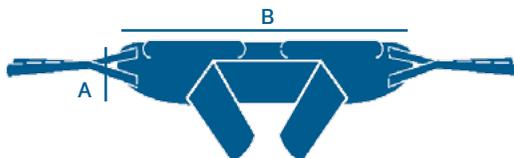

Composition  
Jersey 100 % polyester  
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN  
Mousse PE 50 kg/m<sup>3</sup>  
Mousse PE 100 kg/m<sup>3</sup>  
Mousse polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>  
Mousse polyuréthane 18 kg/m<sup>3</sup>  
Enduction polyuréthane sur polyester  
Biais polyester 40 mm  
Biais polyester 20 mm  
Auto-agrippant 100 % polyester

### NOTICE D'UTILISATION

**Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.**

Positionner le bas du dossier au niveau des omoplates afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne, afin que les bourrelets soient sous les aisselles. Fermer le plastron.

Accrocher les deux attaches du dossier aux crochets du releveur mobile.

### RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet d'ajuster la position de la personne.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles. Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du releveur mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le releveur mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

v 02.03/2019



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**