

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

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
SANGLE DORSALE



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION
PAR UN PROFESSIONNEL DE
SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle Dorsale est disponible en 4 tailles et s'utilise avec tous les verticalisateurs.
- Elle s'utilise positionnée sur les lombaires afin de déclencher chez le patient le schéma naturel de relevage.
- Son doublage en mousse rigide répartit le phénomène de traction et sa sangle sous-fessière permet des transferts en position assise.



SWYP2-PF


Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

SANGLE DORSALE

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	Tour de poitrine	A	B
S	70 / 90	21	78
M	90 / 115	25	92
L	115 / 140	29	106
XL	140 / 165	33	120

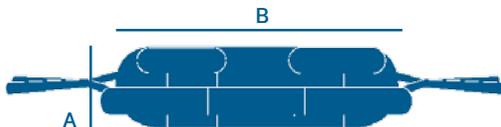

Composition

- Jersey 100 % polyester
- Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
- Sangle polyester 50 mm - 2500 DaN
- Mousse PE 50 kg/m³
- Mousse PE 100 kg/m³
- Mousse polyuréthane 20 kg/m³
- Mousse polyuréthane 18 kg/m³
- Enduction polyuréthane sur polyester
- Biais polyester 40 mm
- Biais polyester 20 mm
- Auto-agrippant 100 % polyester

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

Positionner le bas du dossier au niveau des lombaires afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne.

Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne.

Fermer le plastron.

Accrocher les deux attaches du dossier aux crochets du verticalisateur (lève-personnes/releveur mobile).

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet d'ajuster la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en œuvre les sangles. Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du verticalisateur (lève-personnes/releveur mobile), lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le verticalisateur (lève-personnes/releveur mobile), s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ