

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.*

Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

HAMAC ÉCO FILET



Compatible avec
la tête amovible
(TAMOV).

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


**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION
PAR UN PROFESSIONNEL DE
SANTÉ**



**NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES
DÉMENTES ET SPASTIQUES**

- Certifiée CE et fabriquée en France, la sangle Hamac Éco Filet est conseillée pour les ramassages au sol en position allongée.
- Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.
- La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



HA-RBA-PF

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.

HAMAC ÉCO FILET

TAILLE & DIMENSION (en cm)

	A	B	C
Taille unique	75	25	108

Composition
Filet 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Biais polyester 20 mm

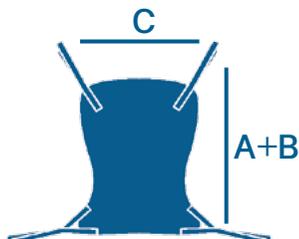

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l'axe vertical.
- Positionner la pliure selon l'axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l'étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du LP.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en œuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Les suspentes de support de cuisse doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personne mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-personne mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ