

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.*

Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.


SANGLE CONFORT EN U ENVELOPPANTE



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle en U Enveloppante est conseillée pour les transferts lit/fauteuil/lit et les ramassages au sol en position allongée.
- La tête intégrée baleinée et la forme enveloppante de la sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.
- Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
- Elle est recommandée pour les transferts de patients agités et anxieux.

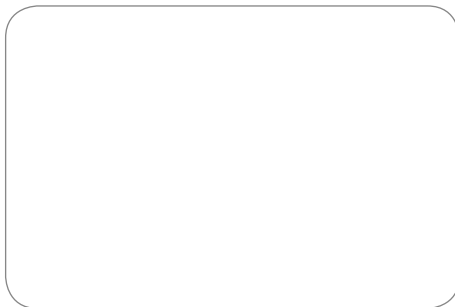

SLK-PF


Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

SANGLE CONFORT EN U ENVELOPPANTE

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C
S	59	88	108
M	66	92	120
L	71	96	134
XL	77	101	150

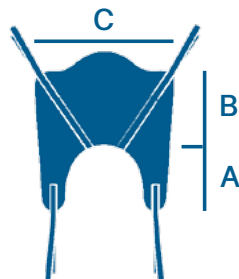

Composition

Tissu 100% polyester ou vinyle armé
Sangle polyester 40 mm 1450 DaN
Mousse PE 50 kg/m³
Baleinage aluminium 15x3 mm
Biais polyester 40 mm

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

Le dossier de ce type de sangle est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

La sangle avec dossier et filet de rétention dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personne en quatre attaches haute et basse :

2, de part et d'autre du dossier

1, à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossier au niveau du coccyx afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Ne pas croiser les attaches du support de cuisse. Accrocher les deux attaches du dossier et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personne.

RÉGLAGES : Le système d'accrochage, par attache multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en œuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Les suspentes de support de cuisse doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personne mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-personne mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ