

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

GILET YZA

POUR TOUS FAUTEUILS




**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



Un gilet, plus un module pelvien en taille unique, vous permettent de passer d'un maintien de buste à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

• Périmètre maximum utile : 200 cm

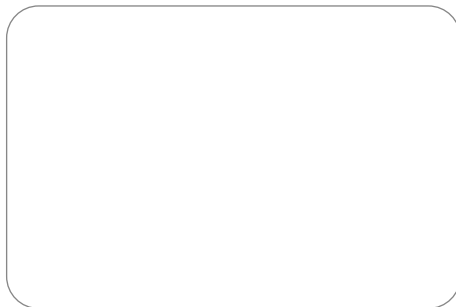

YZA2GBHP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

GILET YZA

Composition
Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Biais 91 % polyamide - 9 % élasthanne
Sangle 100 % polyester
Épaulière en PVC
Boucle nylon

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

Le Gilet YZA se décline sous 2 variantes modulables :

1 -Le Gilet YZA de Buste (YZA-GB)

- a - La partie pelvienne doit être retournée à l'intérieur du gilet
- b - Mettre en place le gilet de buste, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- d - Ceinturer le patient et le dossier du fauteuil avec la sangle abdominale.
- e - Fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- f - Passer une sangle d'épaule sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.

2 -Le Gilet YZA Intégral (YZA-GI) se compose du Gilet YZA de Buste à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien Pelvien.

- a - Positionner le module de maintien pelvien sur l'assise du fauteuil, et fixer la sangle 25 mm au dossier du fauteuil avec le minimum de jeu.
- b - Asseoir le patient sur le fauteuil et sur la sangle.
- c - Mettre en place le gilet de buste, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil.
- d - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- e - Fermer la boucle nylon de la sangle abdominale, puis ajuster la longueur de la sangle, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- f - Passer la sangle du maintien pelvien dans le passant de la partie pelvienne. Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.



Compatible avec le système NAUSI-SURE à clé magnétique.
Nous consulter pour plus d'information.

v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ