

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

MAINTIEN INTEGRAL SLIM

POUR TOUS FAUTEUILS



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT ET
MAINTENIR LE BUSTE DROIT



Périmètre maximum utile : + 230 cm
Hauteur de la ceinture et largeur
partie pelvienne : + 11 cm
Largeur sangle : + 48 mm
Boucle : 50 mm

Ses hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

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
- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation)
- Tour de taille (en cm)



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.



CSYP2HP-PF



v 07.02/25

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



MAINTIEN INTEGRAL SLIM

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé de
mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon
Epaulières : mousse thermocompressée

- Positionner la partie pelvienne sur l'assise du fauteuil et faire sortir la boucle vers l'arrière du fauteuil.
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- Fermer la ceinture en utilisant la fermeture auto-agrippante.
- Mettre en place le baudrier, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne.
- Passer la sangle de la partie ceinture derrière le dossier du fauteuil.
- Avant de la refermer, sans l'ajuster, vérifier que l'attache de dossier à une boucle femelle vers le bas et deux boucles femelles vers le haut.
- Fermer les 4 boucles arrières et les ajuster à la morphologie du patient et à son support.