

**Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.**

## MOUFLES DE SÉCURITÉ



baleinage  
aluminium  
intégré

À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :

**ELLES EMPÊCHENT LE  
PATIENT DE S'ENLEVER  
LES DISPOSITIFS DE  
SOINS AINSI QUE LES  
PROTECTIONS CONTRE  
L'INCONTINENCE.**

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


**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE  
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET  
D'UNE FORMATION PAR UN  
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



Les Moufles de Sécurité empêchent le patient de s'enlever les dispositifs de soins ainsi que les protections contre l'incontinence.

La partie respirante en filet sur le dessus augmente le confort et le baleinage aluminium intégré évite la flexion de la main.



LMMFL-HP

### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

## MOUFLES DE SÉCURITÉ

### Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane  
doublé de mousse polyuréthane  
Complexage polyester/ouate de polyester  
soudé aux ultra-sons  
Filet 100 % polyester  
Biais 100 % coton  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon  
Baleinage aluminium

### NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

**ELLES EMPÊCHENT LE PATIENT DE S'ENLEVER LES DISPOSITIFS DE SOINS  
AINSI QUE LES PROTECTIONS CONTRE L'INCONTINENCE.**

- Insérer la main du patient dans une moufle, le filet sur le dessus de la main.
- Fermer la boucle nylon puis régler le serrage.
- Assurer la fermeture avec l'auto-agrippant.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**