

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :  
coutures, des sangles, du tissu.*

*Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

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
## SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION  
PAR UN PROFESSIONNEL DE  
SANTÉ**



- Certifiée CE et fabriquée en France, la Sangle d'Aide à la Déambulation est disponible en 4 tailles.
- Elle s'utilise positionnée sur les lombaires afin de déclencher chez le patient le schéma naturel de relevage.
- Son doublage en mousse rigide répartit le phénomène de traction et ses sangle jambière sécurise la déambulation.



SWYDE2-PF


### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

# SANGLE D'AIDE À LA DÉAMBULATION

## TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	Tour de poitrine	A	B	C
S	70 / 90	21	78	72
M	90 / 115	25	92	76
L	115 / 140	29	106	80
XL	140 / 165	33	120	84

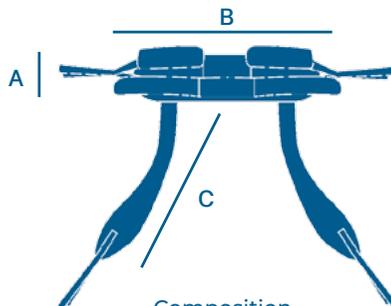

### Composition

- Jersey 100 % polyester
- Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
- Sangle polyester 50 mm - 2500 DaN
- Mousse PE 50 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse PE 100 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse polyuréthane 20 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse polyuréthane 18 kg/m<sup>3</sup>
- Enduction polyuréthane sur polyester
- Biais polyester 40 mm
- Biais polyester 20 mm
- Auto-agrippant 100 % polyester

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en œuvre les sangles. Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur. Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du verticalisateur (lève-personnes/releveur mobile), lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le verticalisateur (lève-personnes/releveur mobile), s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

v 02.03/2019



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ