

SANGLES DE LÈVE-PERSONNES



Aide au Choix

Nous avons mis en place un code couleur afin d'identifier rapidement la taille de chaque sangle :

- à la taille S correspond la couleur Jaune
- à la taille M correspond la couleur Rouge
- à la taille L correspond la couleur Verte
- à la taille XL correspond la couleur Bleue
- aux tailles 2XL, 3XL, 4XL correspondent la couleur Orange (page 87)
- à la taille TU (Taille Unique) correspond la couleur Noire
- SUR DEVIS, nos sangles peuvent être réalisées en taille XS

Pour sélectionner la taille d'une sangle, vous pouvez vous aider du tableau ci-contre en tenant compte des deux facteurs suivants :

- la taille du patient
- le poids du patient

Guide des Tailles

Poids / Taille	1m50	1m55	1m60	1m65	1m70	1m75	1m80	1m85	1m90 + 1m90
40 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
45 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
50 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
55 kg	S	S	S	S	S	S	M	M	M
60 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M
65 kg	M	M	M	S	S	S	M	M	M
70 kg	M	M	M	M	M	M	M	M	M
75 kg	L	L	M	M	M	M	M	M	M
80 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M
85 kg	L	L	L	L	M	M	M	M	M
90 kg	L	L	L	L	L	L	M	M	M
95 kg	L	L	L	L	L	L	M	M	M
100 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L
110 kg	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L
120 kg	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L
130 kg	XL								
160 kg	2 XL	XL	XL	XL					
190 kg	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	XL	XL	XL
220 kg	3 XL	2 XL	2 XL	XL	XL				
250 kg	4 XL	4 XL	3 XL	3 XL	3 XL	3 XL	2 XL	2 XL	2 XL
280 kg	4 XL	3 XL	3 XL	3 XL					
320 kg	4 XL								

	Sangle laissée sous le patient au fauteuil	Sangle retirée au fauteuil	Toilette et mise au WC
Perte de tonicité membres inférieurs et bon maintien de buste et de tête	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide sans têtère intégrée (SST-PF & SSTBA-PF) (page 17)	Sangle de toilette éco (page 13) Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette (page 21)
Perte de tonicité membres inférieurs et aucun maintien de buste avec bon maintien de tête	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangles en U éco (page 14) Sangles en U (page 16) Sangles à réglage rapide sans têtère intégrée (SST-PF & SSTBA-PF) (page 17)	Sangle de toilette (page 21)
Perte de tonicité membres inférieurs, aucun maintien de buste et sans un bon maintien de tête	Sangle hamac éco filet avec option têtère (page 15) Sangles hamac avec option têtère (page 18)	Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)
Patient amputé	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangles hamac sans croisement (page 19)
Patient agité	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossier (page 24)	Sangles hamac sans croisement (page 19)
Patient spastique	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)	Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangle de transfert rapide (page 20) Sangle de toilette avec option têtère (page 21)
Patient dépendant physique et psychique	Sangle hamac éco filet (page 15) Sangles hamac (page 18)	Sangle en U enveloppante (page 23) Sangle à dossier (page 24) Sangles à réglage rapide avec têtère intégrée (SML-PF & SMLBA-PF) (page 17) Sangle ergonomique (page 22)	Sangles hamac sans croisement avec option têtère (page 19)
Contre-indication de constrictions des hanches	Sangles hamac sans croisement (page 19)	Sangle de transfert rapide (page 20)	Sangle de transfert rapide (page 20)

Choix conseillé

Choix secondaire

Choix fortement déconseillé