



NAUSICAA

MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992



BOUCLE MAGNETIQUE NAUSI-SURE

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes mobiles permettant de transférer une personne en position debout. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

Le système NAUSI-SURE comporte
2 éléments :

- 1 Boucle 50 mm double passant avec sa fermeture magnétique.

- 1 Clé magnétique d'ouverture

Ces deux éléments sont vendus
séparément.

Le système NAUSI-SURE en place permet de conserver les
réglages en ajustant simplement les sangles.

Modèle protégé

Réf.: NAUSISURE2-BOU-PF

Mise en place



1 - Retirer la boucle 50 mm d'origine.

Clé magnétique
d'ouverture



Boucle 50 mm double
passant avec sa fer-
meture magnétique.

2 - Ouvrir la boucle NAUSI-SURE avec la
clé magnétique.

v01.03/25

Utilisation



1 - Déployer les languettes (rouges).



2 - Engager la première sangle noire 50 mm du dispositif.



3 - Engager la seconde sangle noire 50 mm du dispositif.

4 - Refermer les languettes de sécurité en passant l'ergot au travers de l'oeillet.



5 - Refermer le NAUSI-SURE avec le bouchon magnétique. (la clé magnétique(bleue) ne sert qu'à l'ouverture)

