

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :  
coutures, des sangles, du tissu.  
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*

## HAMAC CONFORT STANDARD



Compatible avec  
la tête amovible  
(TAMOV).

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


**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT  
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE  
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR  
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



**NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES  
DÉMENTES ET SPASTIQUES**

- Certifiée CE et fabriquée en France, la sangle Hamac Confort Standard est conseillée pour les transferts lit/fauteuil/lit où la sangle est laissée au fauteuil.
- Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.
- La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement et la mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.



SHAC-PF


## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

# HAMAC CONFORT STANDARD

## TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C
<b>S</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>54</b>
<b>M</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>65</b>
<b>L</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>76</b>
<b>XL</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>86</b>

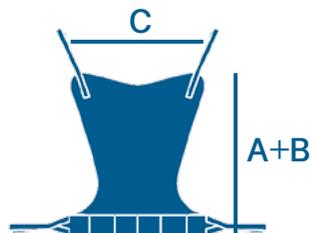

Composition  
Jersey 100 % polyester  
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN  
Mousse PE 50 kg/m<sup>3</sup>  
Biais polyester 40 mm

## NOTICE D'UTILISATION

**Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.**

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l'axe vertical.
- Positionner la pliure selon l'axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l'étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du LP.

## RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

v 02.03/2019



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**