

*Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif :
coutures, des sangles, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.*


HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT (AVEC TÊTIÈRE)



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT
ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR
UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ



- C'est une sangle hamac en forme de U qui évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
- Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.
- Cette sangle évite la constriction des hanches.
- Elle fait office de hamac percé.
- Elle est dotée d'une tête à attaches.

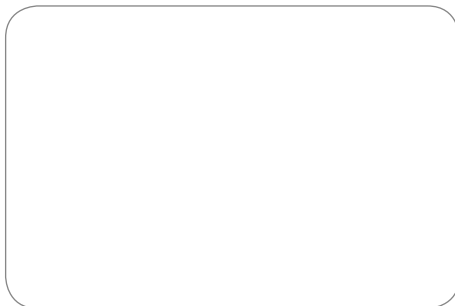

SUCPEHAT-PF


Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

HAMAC CONFORT SANS CROISEMENT (AVEC TÊTIÈRE) C

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C
S	41	53	75
M	46	57	83
L	50	61	92
XL	55	66	102

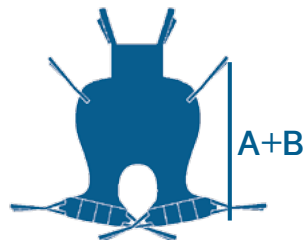

Composition
Filet 100 % polyester
Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN
Biais polyester 40 mm
Mousse PE 50 kg/m³

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette sangle si la taille ne convient pas au patient.

- Latéraliser le patient. Plier le hamac en 2 suivant l'axe vertical.
- Positionner la pliure selon l'axe vertical au milieu du dos du patient.
- Poser la moitié de la sangle sur le côté libre du patient.
- Plier le côté de la sangle du côté en appui du patient.
- Retourner le patient sur le dos avec la moitié de la sangle posée sur le côté libre.
- Relatéraliser le patient sur la sangle sur le côté antérieurement libre.
- Dégager la partie précédemment pliée et l'étaler.
- Mettre le patient sur le dos sur la sangle déployée.
- Accrocher les suspentes hautes et basses au milieu du LP.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet de faire varier la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.

v 02.03/2019



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**