

WAYUP

PRÉSENTATION DE GAMME

La GAMME WAYUP répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant que releveur-mobile.

Elle utilise le mouvement breveté du WAYUP, qui prend en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.

La sangle se positionne au niveau de la taille, le réglage d'accroche se fait la sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

Les mains sont posées sur les poignées et les bras tendus pour activer la tonicité du buste.

Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position debout.

Le déploiement partiel du bras de relevage combiné à la sangle sous-fessière de la Sangle Dorsale (page 51) donne une position assise.

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.

Une fois les jambes sécurisées grâce à l'appui-tibias réglable en hauteur et le cale-talon, le mouvement de levage est réalisable.

Les positions ainsi obtenues permettent l'activation de la mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.



FLASHER

pour visionner la vidéo de la gamme WAYUP sur notre chaîne Youtube



WAYUP 4
page 32



WAYUP 4 RABAISSÉ
page 33



WAYUP ECP
page 34



WAYUP PLUS
page 35