

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

MAINTIEN DE PIED




**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :

**MAINTIEN LE PIED SUR
LA PALETTE DE FAUTEUIL
ROULANT**

Le Maintien de Pied permet de maintenir le pied sur la palette de fauteuil.

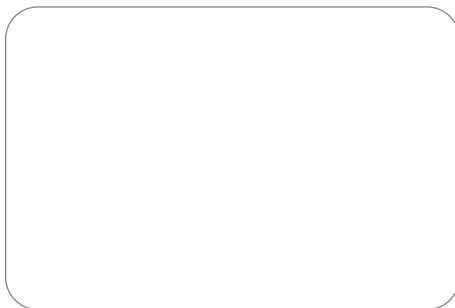

LMDP-HP-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

MAINTIEN DE PIED

Composition
Jersey enduit de polyuréthane doublé de
mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Auto-agrippant 100 % polyester
Mousse PU 100 kg/m³

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

MAINTIEN LE PIED SUR LA PALETTE DE FAUTEUIL ROULANT

- Fixer chaque maintien de pieds sur chaque palette du fauteuil roulant avec l'auto-agrippant de la semelle du maintien de pied.
- Poser chaque pied du patient dans un maintien de pied.
- Refermer le maintien de pied sur le pied du patient avec l'auto-agrippant.



v 03.03/2020



CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ