

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

TALONNIÈRES

POUR TOUS FAUTEUILS



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



TALONNIÈRE PETIT MODÈLE

USAGE :
**AIDE À LA PRÉVENTION
DE L'ESCARRE DU TALON**


OBJECTIF :

- Elles protègent des frottements sur les talons et les malléoles.

Ces Talonnières (petit modèle et grand modèle) permettent d'envelopper le pied dans un revêtement en fourrure synthétique, permettant ainsi de prévenir les frottements sur la peau et de soulager les points de pression.

TALONNIÈRE GRAND MODÈLE

USAGE :
**AIDE À LA PRÉVENTION
DE L'ESCARRE DU TALON**

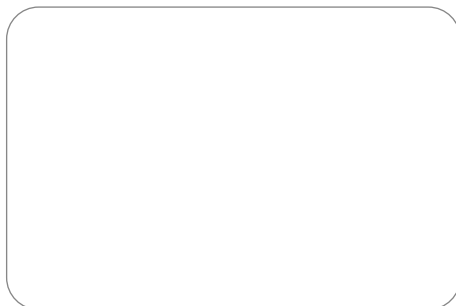

LM2TAL-PF

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.

TALONNIÈRES

Composition

Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-agrippant 100 % polyester
Biais 100 % coton

NOTICE D'UTILISATION

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

USAGE : AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE DU TALON

- Mettre le talon, côté fourrure, bien au creux de la talonnière.
- Fermer la talonnière sur le pied à l'aide du ou des auto-agrippants.

v 03.03/2020



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE
L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ**