



Sangle hamac sans croisement

Evite la constriction des hanches.

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.


La forme hamac percée évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
 Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses.
 Cette sangle évite la constriction des hanches et est adaptée pour les amputés courts. Chaque jambe est prise indépendamment.

Réglage des accroches



Le système d'accroche sur fléau 2 points ou 4 points permet de faire varier la position du patient.
 Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position assise avec un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

Positionnement des sangles

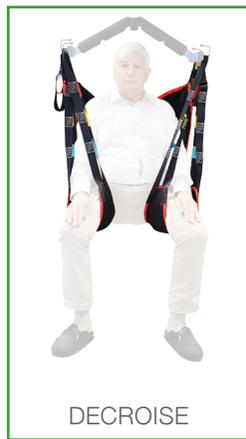

Choix conseillé



Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
 FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SUCPEHA2-PF (jersey confort) SUCBAHA2-PF (filet confort)
OPTION	TAAT-PF (tête à attaches) TAMOV-PF (tête amovible)