

## Procédure VS-10 :

# Changement du câble de télécommande 2 fonctions VS-TLCM

### Pièces détachées :

**VS-TLCM** : Télécommande 2 fonctions UMEC à partir du numéro de série N°0001

Carte pour télécommande 2 fonctions UMEC

**Matériel** : Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse ainsi que d'une mousse pour ne pas endommager la batterie.

Positionner la télécommande sur l'avant afin de dévisser les 4 vis extérieures.




ETAPE  
N°1

Retourner le boîtier puis l'ouvrir en disposant les éléments comme indiqué ci-après :



ETAPE  
N°2

Enlever le branchement en bas de la carte (1) puis dévisser les 2 vis de la carte pour l'enlever :

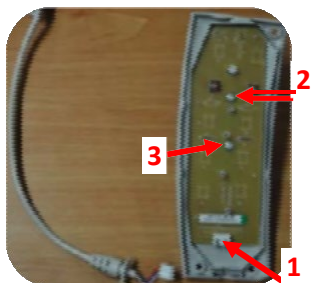

ETAPE  
N°3

Rebrancher le câble à la nouvelle carte puis visser la carte sur le boîtier.



ETAPE  
N°4

Revisser les 4 vis, la télécommande est prête à être utilisée :



ETAPE  
N°5