

## Procédure VS-12 :

# Changement du crochet de télécommande VS-TLCM(-ECP)

### Pièces détachées :

**VS-TLCM(-ECP) :** Télécommande 2(ou 4) fonctions UMEC à partir du numéro de série

N°0001 Crochet pour télécommande UMEC

**Matériel :** Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse.

Positionner la télécommande sur l'avant afin de dévisser la vis fixant le crochet (1) :

ETAPE  
N°1



Enlever le crochet abimé et le remplacer par le nouveau crochet :

ETAPE  
N°2



Revisser la vis (1), la télécommande est prête à être utilisée.

ETAPE  
N°3

