

Procédure VS-13 :

Changement du carter de vérin 6000N et 8000N

Pièces détachées :


VS-VRN-6; VS-NLV-VRN; VS-VRN-FS8; VS-WP-VRN;

2 caches 6000N ou 2 caches 8000N

Matériel : Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse.

Positionner le vérin sur le côté puis dévisser les 4 vis :

ETAPE
N°1

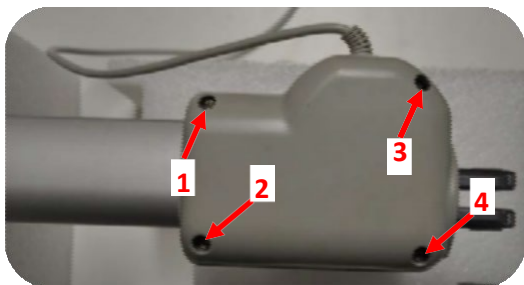

Enlever le premier cache, vous devez voir ceci, retournez ensuite le vérin :

ETAPE
N°2



Enlever le deuxième cache, bien remettre le disque caoutchouc.

ETAPE
N°3



Remettre le cache, tourner le vérin puis repositionner le deuxième cache, enfin, visser les 4 vis :

ETAPE
N°4

