

# Procédure VS-14 :

## Changement d'un câble de vérin 6000N et 8000N

**Pièces détachées :**


**VS-VRN-6; VS-NLV-VRN; VS-VRN-FS8; VS-WP-VRN;**

1 câble d'alimentation de vérin 6000N ou 8000N

**Matériel :** Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse.



Positionner le vérin sur le côté puis dévisser les 4 vis :

ETAPE  
N°1

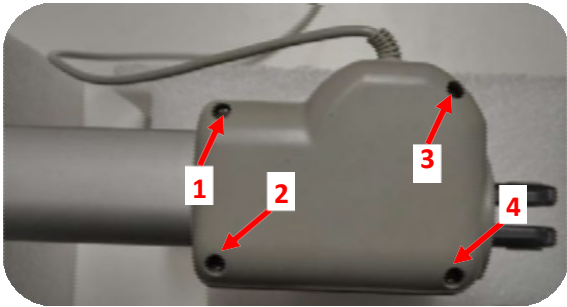


Enlever le premier cache, vous devez voir ceci, dévisser ensuite les 4 vis noires pour enlever le cache métal :

ETAPE  
N°2

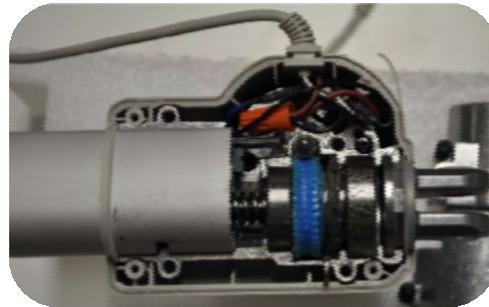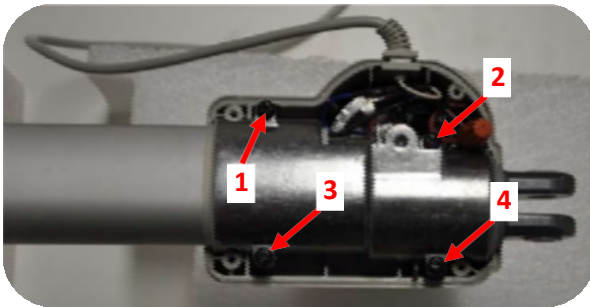

Enlever la chape, puis positionner la nouvelle.

ETAPE  
N°3

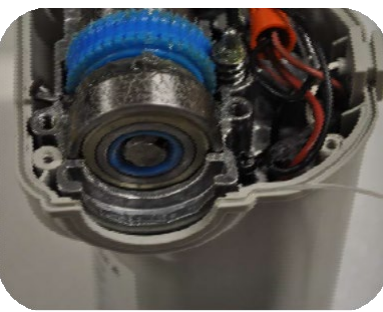

Vérifier que le joint du carter soit bien dans la rainure puis repositionner le cache, enfin visser les 4 vis :

ETAPE  
N°4

