

Procédure VS-16 :

Changement de chape haute de vérin

Pièces détachées :


VS-VRN-6; VS-NLV-VRN; VS-VRN-FS8; VS-WP-VRN; VS-VRN-FSM10; VS-VRN-ALU10

1 chape haute de vérin 6000N ou 8000N ou 1000N

Matériel : Se munir d'une clé 6 pan taille 2.


Positionner le vérin sur le côté puis dévisser les 2 vis pour libérer la chape :

ETAPE
N°1

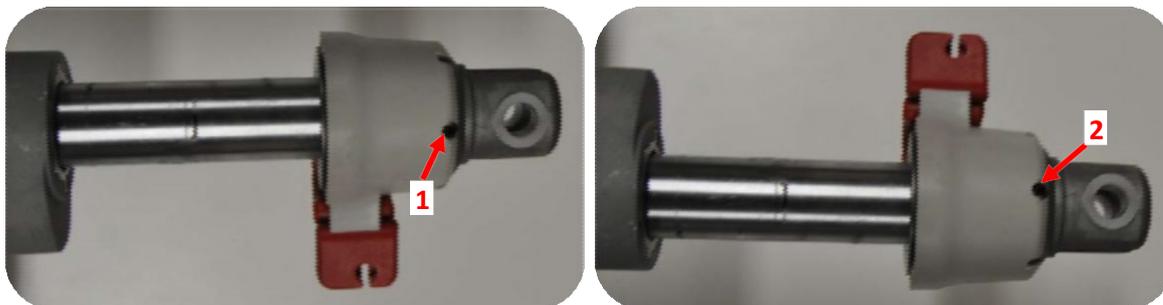

Dévisser la chape cassée sans enlever le cache blanc (1) :

ETAPE
N°2

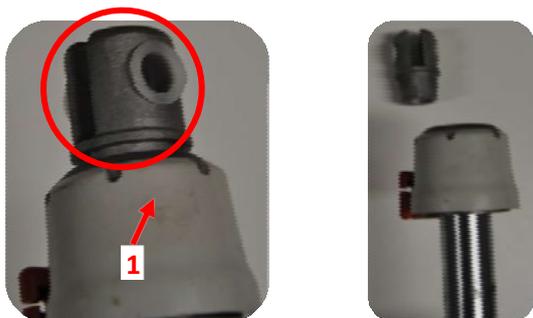

Revisser la nouvelle chape en faisant attention qu'elle soit comme l'image (1) :

ETAPE
N°3



Revisser les 2 vis pour libérer la chape :

ETAPE
N°4

