

# AIDE AU CHOIX : SANGLES DE LEVE-PERSONNES

Les sangles Nausicaa Médical s'utilisent avec tout lève-personne ou rail de transfert pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou. Conformément au document de l'ANSM « compatibilité entre dispositifs médicaux » de Juillet 2007 : les sangles de verticalisateurs Nausicaa Médical sont conformes à la norme EN ISO 10535 : 2021 et notre processus de gestion des risques démontre que l'utilisation des sangles Nausicaa Médical avec des verticalisateurs pourvu d'un système d'accrochage par crochet 2 points n'engendre pas de risques supplémentaires par rapport au dispositif d'origine.

	SANGLES RECOMMANDEES POUR LE TRANSFERT		Sangles recommandées pour la toilette et mise au WC. Ne peuvent rester sous le patient.
	SANGLE HAMAC (Peut rester sous le patient)	SANGLE EN U (Ne peut pas rester sous le patient)	
Perte de tonicité membres inférieurs <b>avec</b> maintien de buste et <b>avec</b> maintien de tête	Sangle Hamac	Sangle en U Sangle en U à réglage rapide	Sangle de toilette Sangle en U de transfert rapide
Perte de tonicité membres inférieurs <b>sans</b> maintien de buste et <b>avec</b> maintien de tête	Sangle Hamac	Sangle en U Sangle en U à réglage rapide	Sangle de toilette
Perte de tonicité membres inférieurs <b>sans</b> maintien de buste et <b>sans</b> maintien de tête	Sangle Hamac avec option tête	Sangle en U à dossier Sangle en U à réglage rapide avec option tête Sangle en U ergonomique	
Patient amputé	Sangle Hamac sans croisement		
Patient agité/anxieux	Sangle Hamac sans croisement	Sangle en U enveloppante Sangle en U à dossier	
Patient spastique	Sangle Hamac sans croisement avec option tête	Sangle en U à dossier Sangle en U à réglage rapide avec option tête Sangle en U ergonomique	Sangle de toilette avec option tête Sangle en U à réglage rapide
Patient dépendant physique et psychique	Sangle Hamac	Sangle en U enveloppante Sangle en U à dossier Sangle en U à réglage rapide avec option tête Sangle en U ergonomique	
Contre-indication de constrictions des hanches	Sangle Hamac sans croisement	Sangle de transfert rapide	Sangle de transfert rapide



Tous nos textiles répondent à la norme «REACH».