

SANGLE DE TOILETTE PREMIUM JERSEY

La forme en U élargie de cette sangle dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes, et améliore la mise en place et le retrait de la sangle.

Le passage des jambes se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Cette sangle se positionne avec les bras à l'extérieur.

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



Choix conseillé



Choix conseillé



Choix secondaire

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible et baleinée (TABAL-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.



- Disponible uniquement en jersey
- Tailles S, M, L, XL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	STO-PF-
OPTION	TABAL-PF (tête amovible et baleinée)