

SANGLE EN U A REGLAGE RAPIDE

Compatible avec les rails de transfert, rails au plafond et portique.

- Disponible en jersey confort et en filet confort
- Tailles S, M, L, XL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	SST-PF (jersey confort) SSTBA-PF (filet confort) SML (jersey confort avec tête intégrée et baleinée) SMLBA-PF (filet confort avec tête intégrée et baleinée)
-------------	---

OPTION	TAMOV-PF (tête amovible)
---------------	--------------------------



La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.


Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses et les deux points d'accroches à deux réglages (particulièrement adaptées pour les fléaux 2 points permettent des combinaisons rapides pour des transferts assis, semi-allongés et allongés.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



La grande boucle vous permet de moduler l'inclinaison sans avoir à décrocher la sangle. Le système d'accrochage à 2 suspentes permet de passer d'une position assise à une position allongée. Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules et le plus long possible aux jambes.

POSITIONNEMENT DES SANGLES

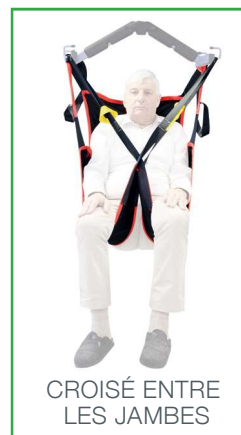

Choix conseillé



Choix secondaire

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple (préconisé uniquement sur le modèle réf.: SST).

