

# SANGLE EN U ENVELOPPANTE

Pour patients agités anxieux.

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE  
FABRICATION FRANÇAISE

RÉF. SLK-PF



La tête intégrée baleinée et la forme enveloppante de cette sangle sont recommandées pour les transferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert et est adaptée aux fléaux 2 points.


## RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage rouge) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

## POSITIONNEMENT DES SANGLES

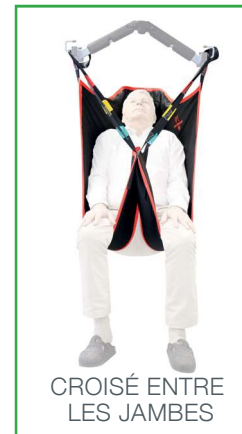

CROISÉ ENTRE  
LES JAMBES

Choix conseillé



CROISÉ SOUS LES  
JAMBES

Choix secondaire