

SANGLE EN U ERGONOMIQUE

Sa partie dos prolongée par la tête en mousse rigide, doublée d'un tissu 3D, rend cette sangle particulièrement confortable et permet de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Sa mise en place peut être effectuée uniquement en position assise.

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



La grande boucle permet de moduler l'inclinaison sans avoir à décrocher la sangle. Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de faire le réglage sur la sangle rouge et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISE ENTRE LES JAMBES

Choix conseillé



CROISE SOUS LES JAMBES

Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SMB-PF
------	--------