

SANGLE HAMAC PREMIUM FILET

La sangle filet est idéale pour le bain et la toilette. Elle évite la macération et sèche rapidement.

Cette sangle est proposée en jersey confort avec mousse confort au niveau des jambes. Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle une sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

Cette sangle peut rester sous le patient.

- Disponible en filet et en filet confort
- Tailles S, M, L, XL.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal en position semi-allongée nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire sur un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



Choix conseillé



Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

TÊTIÈRE (OPTION)

La têtière à attaches (TAAT-PF) et la têtière amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en option.



RÉF.	SHA2BA-PF (filet) SHAC2BA-PF (filet confort)
OPTION	TAAT-PF TAMOV-PF